

SE – SVENSKA

DUBBELHÄRDAT KOMPOSITHARTS

Avsedd användning: används för att utföra antingen direkt eller indirekt tandrestaurering

Indikationer: som pulppubbyggnadskomposit vid indirekt restaurering eller som ett pelarcement när det används tillsammans med lämpligt dentinlin.

Funktionsegenskaper – polymerisationskrmpning: Encore D/C MiniMix, 1,4 %, Encore D/C i 25 ml-kasset, 2,8 %

BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSE AV TAND/KANAL

- Isolera den tand som ska restaureras. Vi rekommenderar att du använder en kofferdamm eller bomullsrullar.
- Ta bort befintliga restaureringar och karies. Vi rekommenderar att du använder Expose®-kariesindikator för att bekräfta att all kariesvävnad har tagits bort. Om du använder någon annan teknik för avlägsnande av karies använder du Expose för att bekräfta att karieslesionen omges helt av friskt dentin.
- Om en pelare ska användas förbereder du platsen för pelaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Etsa hela preparatet i 20 sekunder med 32–40 % fosforsyra. Vi rekommenderar användning av Centrix Onyx™ 40 % fosforsyra med etsningsgel.
- Skölj med vattensprej i 30 sekunder och låt lufttorka lätt. Emaljen på preparatet ska ha ett frostat utseende.
- Placera det valda limsystemet i preparatet enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa fullständig härdning av allt material i kanalen rekommenderar vi att du använder sjunde generationens dubbelhärdande lim från Connexio® som är ett ljusaktiverat självetsande system med en dubbelhärdande aktivator. Använd inte självetsande limsystem i en flaska. När du applicerar primer kontrollerar du att allt lösningsmedel har avdunstat och att preparatet har ett glansigt utseende. Före ljushärdning ska limmet tunnas ut med en lätt luftsprej.

PULPUPPYGGNAD MED HJÄLP AV ENCORE D/C

- Välj önskad nyans av Encore D/C-pulppubbyggnadsmaterial
 - naturlig nyans (A2) för användning under helt keramiska restaureringar.
 - Kontrastrnyans (blå) för att särskilja pulpmaterial från tandstruktur.
- Injicera materialet i preparatet. Fyll nedifrån och upp för att minska risken för tomrum. Se till att spetsen är inbäddad i materialet för att undvika att det bildas fickor med luft.
 - Vid användning av Encore D/C MiniMix-kassetter
 - För in MiniMix-kassetten i en Centrix Snap-Fit™-spruta (passar alla kompositpistoler).
 - Ta bort locket från MiniMix-kassetten och sätt fast blandningsmunstycket.
 - Tryck alltid ut en liten mängd från spetsen för att säkerställa korrekt blandning och flöde.
 - Vid användning av Encore D/C Automix 25 ml-kassetter
 - Placera kassetten i en applikatorpistol av typ S25.
 - Ta bort locket från kassetten och sätt fast en ny blandningsspets.
 - Tryck alltid ut en liten mängd från spetsen för att säkerställa korrekt blandning och flöde. Centrix Access Automix-nålspetsen (REF: 290025) kan snäppas fast på den öppna änden av blandningsspetsen för placering av material i den öppna kanalen.
- Härda materialet.
 - Ljushärdning: Följ rekommendationerna för ljushärdningsenheten. Enheterna varierar mycket vad gäller både uteffekt och det ljusspektrum som används. Allmänt gäller:
 - för 2 mm härdningsdjup: 20 sekunder (-20")
 - för 4 mm (max.) härdningsdjup:: 40 sekunder (-40")
- Låt självhärda (Encore D/C är ett dubbelhärdande material som självhärdas helt) –
 - Arbetstid: 1:30 minuter
 - Total stelningstid: 5:00 minuter
- Efter stelning skär du till och slutför preparatet som vanligt med ett vattenkytt diamantervtyg eller borr.
- För att hålla materialet färskt och undvika att det stelnar i förtid låter du blandningsspetsen sitta kvar på kassetterna mellan användningstillfällena.

Obs! När du använder ett matrisband eller en förtillverkad pulpaform ska du alltid placera blandningsspetsen direkt i preparatet/matrisen/pulpaformen och trycka ut pastan nedifrån och upp. Testa pulpmaterialet med en undersökningssond för att säkerställa att materialet har stelnat innan du tar bort matrisbandet. Håll den påfyllda pulpformen mot den förberedda tanden under ljushärdning tills pastan har stelnat helt.

PELARCENTERING MED HJÄLP AV ENCORE D/C

- Förbered platsen för pelaren enligt tillverkarens rekommendationer och beskrivningen ovan. Vi rekommenderar att du använder en fiber-/hartspelare för att skapa en fullständigt sammanfogad restaurering av tanden/pelaren/pulpan i ett block.
- Använd ett dubbelhärdande limsystem (t.ex. Connexio) för att säkerställa att allt material, även i den djupaste delen på platsen för pelaren, är fullständigt härdat. Följ tillverkarens anvisningar.

VARNINGAR

- Om pulpan exponeras använder du lämplig pulpaisolering. Använd inte Encore D/C-pulppubbyggnadspasta för direkt applicering på dentin nära pulpan eller om pulpakammaren har exponerats.
- Undvik kontakt med hud och ögon. Vid oavsiktlig kontakt sköljer du omedelbart med mycket vatten och uppsöker läkare vid behov.
- Får ej användas tillsammans med material som innehåller eugenol. Det kan förhindra polymerisering.
- Vatten och oljeförorenad luft måste undvikas eftersom de hindrar polymerisering vid kontaktytan.
- Undvik kontakt med tandköttsvävnad och intilliggande tänder.
- Placering av komposit är kontraindikerad om det inte går att säkerställa ett torrt område.
- Det finns inga kända systemiska biverkningar men pastan ska inte användas på patienter med känd känslighet för bis-GMA, bensoylperoxid eller komposithartsmaterial.
- Det finns risk för infektion om en enkeldosnål används på fler än en patient.

Om en allvarig incident inträffar, i samband med den här enheten, ska den rapporteras till Centrix och till behörig myndighet i användarens eller patientens hemland.



Elektroniska instruktioner finns här:

<https://media.centrixdental.com/hubfs/ifu-sds/encoredcauto-encoredcmini-ifu.pdf>



CENTRIX INCORPORATED

770 River Road, Shelton, CT 06484 USA

(203) 929-5582 (800) 235-5862 FAX (203) 929-6804

www.centrixdental.com



CENTRIX EU IMPORTER

Dental Contact Vertriebs KG

Im Spiet 101 - D 26506

Norden, Ostfriesland Germany

EMERGO AUSTRALIA

Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street

Sydney, NSW 2000, Australia

CE
0482

centrix[®]
MAKING DENTISTRY EASIER™