


# Verursachen Ihre Pasten-Füllspiralen Hohlräume, wenn Sie Kalziumhydroxid einspritzen?

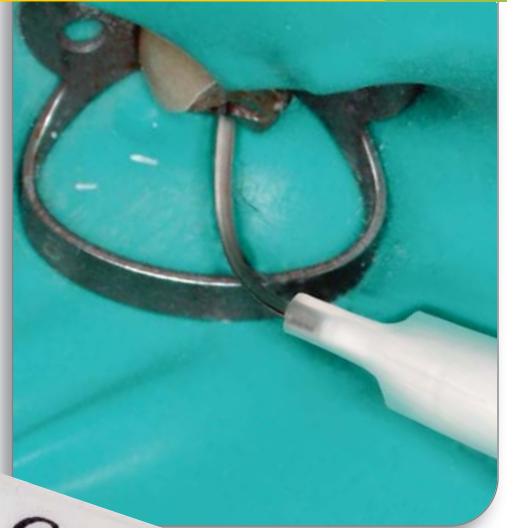

*Die Einmalkarpule von Calciject ermöglicht eine direkte Abgabe in den Kanal und füllt von apikal her auf.*



Unser einzigartiges Abgabesystem ermöglicht das Einspritzen von Calciject, ohne dass wie beim Herausdrehen von Pasten-Füllspiralen auf die Entstehung von Hohlräumen geachtet werden muss. Unser System erleichtert das Versäubern und vermeidet Kreuzinfektion, da die Kartusche nach der Verwendung einfach entsorgt wird.

Calciject wurde speziell zur medikamentösen Behandlung des Kanals zwischen Wurzelbehandlungen entwickelt. Die Spitze einfach wie gewünscht biegen und die Paste einspritzen. Die Paste füllt den Kanal durch die Kanülenspitze von apikal her auf und versorgt so den gesamten Kanal. Die Spitze entsorgen. Sie können nun Versiegelungsmaterial wie Tempit® platzieren. Wir von Centrix machen Zahnheilkunde einfacher.

- Kein Anmischen, kein Verschmutzen
- Einzeldosis-Kanülenspitzen zur einfachen Platzierung und maximalen Keimreduktion
- Biegbare NeedleTube Spritzenkanüle Gr. 20
- Überlegene Resultate im Vergleich zu Pasten-Füllspiralen
- Röntgenopak
- Funktioniert mit jeder C-R®-Spritze



Bestellen ist einfach. Rufen Sie unter 0800 2368749 an oder kontaktieren Sie Ihren bevorzugten Händler. Besuchen Sie [centrixdental.de](http://centrixdental.de) für weitere Informationen.

CE  
0510

CENTRIX  
**Calciject™**


Kalziumhydroxidpaste zur  
Wurzelkanalbehandlung



**centrix®**

Macht Zahnheilkunde einfacher.™

**Centrix**

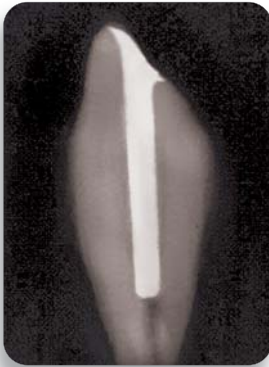

Das Platzieren von Material mit C-R® -Kanülen und -Stopfen erzeugt hohlraum- und porositätenfreie Restaurationen.

**Traditionell**



Traditionelle Positionierung von Material mit Spateln oder Pasten-Füllspiralen.

**GEBRAUCHSANWEISUNG**



1) Die Calciject-Kartusche aus der Packung nehmen.



2) In die Centrix C-R-Spritze stecken und die Schutzkappe abziehen.



3) Kanüle falls gewünscht biegen. Zuerst auf einem Anmischblock testen.



4) Die Spritze mit langsamem, gleichmäßigem Druck ausdrücken und in die Präp injizieren.



5) Einfache Reinigung.

**BESTELLINFORMATIONEN:**

**Calciject**  
Art. Nr. 320003 24 x 0,2 g Calciject-Spitzen

**EMPFOHLENES ZUBEHÖR**

Art. Nr. 130650 Snap-Fit™ -Spritze



**Die Bestellung ist einfach.**

Rufen Sie uns  
gebührenfrei an:  
**0800 CENTRIX**  
(0800 2368749)

Oder kontaktieren Sie Ihren  
bevorzugten Händler.

Besuchen Sie  
**centrixdental.de**  
für weitere Informationen.

