

D/Sense® Crystal™

| MUNDHYGIENE

Kristallpräzipitat-Densensibilisierer mit Doppelwirkung

SCHLUSS MIT POSTOPERATIVER ZAHNEMPFLINDLICHKEIT. D/SENSE CRYSTAL STOPPT DEN SCHMERZ!



Schmerzlinderung in
30 Sekunden!

THE DENTAL
ADVISOR
++++

D/Sense Crystal wirkt schnell und langanhaltend und ist ideal für alle postoperativen Sensibilitäten, wenn Karies nicht die Ursache ist.

10 VON 10 DENTALPRÜFERN EMPFEHLEN, D/SENSE CRYSTAL SELBST AUSZUPROBIEREN!*

D/Sense Crystal ist ein Ein-Schritt-Desensibilisierergel und Kavitätenliner mit Zweifachwirkung. Er reagiert mit Dentin unter Ausfällung von Mikrokristallen aus Calciumoxalat und Kaliumnitrat. Diese Kristalle dringen tief in die Tubuli ein und verschließen die Dentinoberfläche mit einer dauerhaften, säurebeständigen Verbindung (normalerweise weniger als 3 Mikron Dicke). D/Sense Crystal ist für klinische Situationen gedacht, in denen keine Karies vorliegt, der Patient jedoch über postoperative Empfindlichkeit oder natürlich auftretende Dentinüberempfindlichkeit klagt.


- Patentierte Ein-Komponenten-Formel mit doppelter Wirkung
- Bietet eine schnelle Desensibilisierung mit tiefer, lang anhaltender Kristallbildung
- Okkludiert Dentintubuli mit Kalziumoxalat und Kaliumnitrat
- Einzigartiges Verabreichungssystem, mit SofNeedle™ Applikator
- Zeitsparende, Ein-Schritt-Technik
- Präzise, direkte Anwendung - kein Nachtropfen und weniger Abfall
- Schonend für das Weichgewebe - kann am Zahnfleischrand und/oder an freiliegenden Wurzeloberflächen angewendet werden




*Unabhängiges Labor. Daten archiviert.

INDIKATIONEN:


- Nicht kariöse zervikale Läsionen
- Auf jeder freiliegenden Dentinoberfläche, wie etwa den Rändern um provisorische Kronen
- Vor und nach dem Bleaching
- Unter Restaurationen
- Gingivarezession
- Vor und nach der Prophylaxe

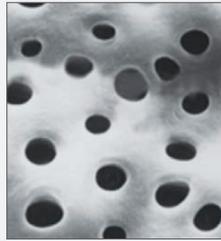

Dentin vor der Behandlung mit D/Sense Crystal.

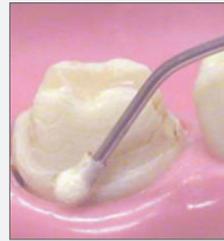

Die SofNeedle-Spitze behandelt präzise nur das Dentin, ohne Weichgewebe zu verletzen.

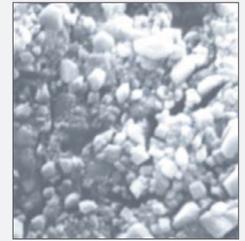

Dentin nach der Behandlung mit D/Sense Crystal. Kalzium-Oxalat und Kaliumnitrat-Kristalle okkludieren effektiv die Tubuli und versiegeln die Dentinoberfläche.

AKTIVER INHALTSSTOFF: KALIUMBIOXALAT

CENTRIX BIETET EINE REIHE VON PRODUKTEN AN, DIE HELFEN, EMPFINDLICHKEIT NACH EINER OPERATION ZU BEHANDELN ODER SOGAR VERHINDERN, DASS SIE ÜBERHAUPT ERST ENTSTEHT:

D/Sense Crystal – ist ein einstufiges Desensibilisierungsgel mit doppelter Wirkung, das zur Behandlung von postoperativer, nicht durch Karies verursachter Zahnempfindlichkeit eingesetzt wird.

Glu/Sense™ – ist für die präoperative Anwendung bei nicht vorhandener Karies in ästhetischen direkten oder indirekten Restaurationen geeignet, um die Entstehung von postoperativer Sensibilität zu verhindern.

BESTELLINFORMATIONEN

REF 310106EU D/Sense Crystal, 6 x 1 mL Mehrwegspritze, 24 x SofNeedle Karpulen ga

REF 290038 144 x SofNeedle Tip, 22 ga

Rufen Sie kostenfrei unter **0800 2368749** an oder wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Händler.
Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf **centrixdental.de**