


STUMPFAUFBAU LEICHT GEMACHT!

DIE MINIMIX 0,5-ML-EINZELDOSISTECHNOLOGIE VERHINDERT MATERIALVERLUST UND KREUZKONTAMINATION.



EINZELDOSIS. KOSTENEFFIZIENT. PROBLEME GELÖST.

Encore® D/C MiniMix® ist unser beliebtestes Lieferformat. Die MiniMix 0,5-ml-Einzeldosistechnologie verhindert Materialverlust und Kreuzkontamination. Die kleinere Größe lässt sich im Mund leichter handhaben, während die längere Mischspitze eine einfache Anwendung in Kanälen der zweiten und dritten Molaren ermöglicht. Das patientenfreundliche, kleine Format der MiniMix ist komfortabler für Patienten und wirkt weniger bedrohlich für Angstpatienten.

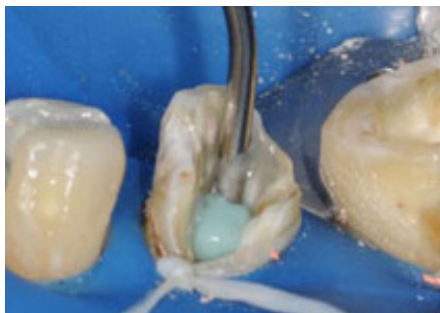

**DAS EINZIGE IN EINZELDOSEN
ERHÄLTICHE, DUALHÄRTENDE
STUMPFAUFBAUMATERIAL**



MERKMALE UND VORTEILE:

- Das hochwertige Stumpfaufbaumaterial gewährleistet eine vollständige Aushärtung aller Komponenten, strukturelle Festigkeit sowie eine einfache Handhabung.
- 20 Sekunden Lichtaushärtung zur Beschleunigung der Abbindung.
- Die NeedleTube® appliziert das Material am Boden des Stiftkanals für maximale Retention ohne Lufteinschlüsse.
- Die standfeste Formulierung erfordert keine Matrize oder Stumpfform und sorgt für maximale Effizienz und Präzision. Kein Verlaufen!
- Es lässt sich wie Dentin beschleifen, um Überfräsen zu reduzieren.
- Röntgenopak für eine klare, kontrastreiche Sichtbarkeit.

ANLEITUNG IN 6 SCHRITTEN FÜR EINEN BLASENFREIEN KOMPOSIT-STIFT- UND STUMPPFAUFBAU MIT ADHÄSIV:



Den Wurzelkanal für die Aufnahme der Encore D/C Kanülenspitze erweitern. Die Ränder abschrägen, um spitze Winkel zu vermeiden.



Den Stiftkanal ätzen, gründlich spülen und trocknen.



Das Adhäsiv gemäß den Herstelleranweisungen applizieren.



Die Kanülenspitze bis zum Boden des Stiftkanals einführen und das Material langsam und mit gleichmäßigem Druck einspritzen.



Das Auffüllen durch weiteres Einspritzen und langsames Zurückziehen der Kanülenspitze fortsetzen.



Sofern gewünscht, Encore D/C lichtaktivieren, um das Abbinden zu beschleunigen. Das Material vollständig aushärten lassen und anschließend den Stumpf beschleifen und formen. Das Resultat ist ein massiver, fest haftender Stumpfaufbau mit Stiftverankerung.

TECHNISCHE DATEN VON ENCORE D/C MINIMIX

Druckfestigkeit	222 MPa
Biegefestigkeit	110 MPa
Diametrale Zugfestigkeit	48 MPa
Lichtaktivierte Aushärtungs-tiefe	2 mm 40 Sekunden
Volumenschrumpfung	1.4%



BESTELLINFORMATIONEN

ENCORE D/C MINIMIX

Enthält 36 Einzeldosis-Kartuschen (je 0,5 ml netto) und 72 Mischdüsen

Art.-Nr. 310254 Farbe Natur 36 St.
Art.-Nr. 310129 Farbe Natur 12 St.



Art.-Nr. 310255 Farbe Kontrastblau 36 St.
Art.-Nr. 310130 Farbe Kontrastblau 12 St.



EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Art.-Nr. 130651 Kurzkolben-Snap-Fit-Spritzen
Art.-Nr. 910630 MiniMix Düsen, Farbe transparent, 10 St.

Die Bestellung ist einfach. Rufen Sie uns an unter **0800 2368749** oder kontaktieren Sie Ihren bevorzugten Händler.

Besuchen Sie centrixdental.eu/de für weitere Informationen.