

## DIAMANT GRIPSTRIP™

# Diamantbeschichtete Streifen für proximales Schleifen und Polieren

**Schnelleres, sanfteres proximales Schleifen und Polieren. Einfacher in der Anwendung. Autoklavierbar. Hohe Wiederverwendbarkeit.**

Jeder GripStrip-Schleif- & Polierstreifen verfügt über zwei unterschiedliche Körnungsbereiche und ermöglicht so ein schnelles und exaktes Formen, Schleifen und Polieren proximaler Oberflächen, um die natürlichste Zahnmorphologie und die zahnschmelzähnliche Geschmeidigkeit zu bewahren.

### Leicht zu greifen, leichte Handhabung, präzise Steuerung

Die Griffform lässt leicht auf den richtigen GripStrip für jeden Gebrauch schließen: Grob, Medium, Fein und Medium Mini für anteriore Verwendung.




### Flexibler, langlebiger, autoklavierbarer Edelstahl

Ermöglicht einfaches Schleifen, um das natürliche Profil und die richtige Form jedes Zahns zu erhalten. Edelstahlstreifen können für die erneute Verwendung autoklaviert werden.

### Schützende Rückseite

Die glatte Rückseite schützt den benachbarten Zahn und den intakten Zahnschmelz vor Abrieb.

[www.centrixdental.de](http://www.centrixdental.de) | 0800 2368749

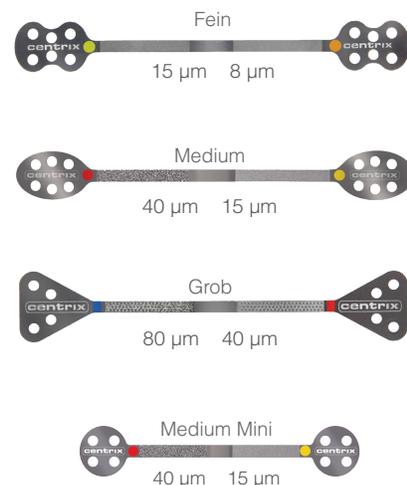

## APPLIED DIAMOND TECHNOLOGY (ADT)

Die Veredelungs- und Polierprodukte von Couture zeichnen sich durch die Centrix Applied Diamond Technology (ADT) aus: einzigartige und präzise Formulierungen ultrafeiner Diamantpartikel, die für ausgezeichnete ‚Hochglanz‘-Oberflächen mit natürlichem Weißgehalt und Schimmer sorgen.

Durch ADT ist eine schnellere Formung, eine einfachere Veredelung und ein glatteres Polieren möglich, dies resultiert in einer ästhetischen und vital anmutenden Restauration.



## GripStrip – Interproximale Reduktion war noch nie so leicht!



**1.** Gleiten Sie den GripStrip vertikal durch den Kontaktbereich am abriebfreien Abschnitt, um einen Abrieb des benachbarten Zahns zu vermeiden. Zur Entfernung, kehren Sie diesen Schritt um. Bei sehr engen Kontaktbereichen hilft ein Keil, Platz zu schaffen.



**2.** Nun kommt der Abschnitt mit mehr der gröberen Körnung zum Einsatz, gleiten Sie den GripStrip in bukkolingualer Richtung um mit der proximalen Reduktion, Formung zu beginnen.



**3.** Wechseln Sie zum Abschnitt mit geringerer Körnung, um die proximalen Oberflächen weiter zu verfeinern und zu glätten.



**4.** Polieren Sie die Oberflächen



**5.** Verwenden Sie erneut immer feinere GripStrips, um die gewünschte Glätte zu erreichen.

### Praktische Hinweise:

- ◆ Fügen Sie einen Keil ein bei engen Kontaktbereichen, um eine leichte Trennung zwischen den Zähnen zu bewirken
- ◆ Feine GripStrips sollten nur zum Polieren und zum Entfernen von Verschmutzungen verwendet werden
- ◆ Das perforierte Design der groben Streifen ist ideal für die grobe Reduktion und orthopädische Platzschaffung.
- ◆ Das Überspringen einer Körnungsgröße führt ggf. zu einer verminderten Qualität der abschließenden Restauration  
Um die Kontaktbereiche zu schützen, müssen die GripStrips immer am glatten abriebfreien Bereich eingeführt und entfernt werden.



Vorher: Unregelmäßige Formen durch Restauration



Danach: Glattes, natürliches Profilergebnis mit schöner Restauration

### BESTELLINFORMATIONEN



**Bestell-Nr. 860012 GripStrip Fein, 12 Streifen**  
Für feine Reduktion und Polieren  
15 µm (gelb)/8 µm (orange)



**Bestell-Nr. 860010 GripStrip Medium, 12 Streifen**  
Für mäßige Reduktion  
40 µm (rot)/15 µm (gelb)



**Bestell-Nr. 860014 GripStrip Medium Mini, 12 Streifen**  
Für mäßige Reduktion  
40 µm (rot)/15 µm (gelb)



**Bestell-Nr. 860011 GripStrip Grob, 12 Streifen**  
Für deutliche Reduktion  
80 µm (blau)/40 µm (rot)



**Bestell-Nr. 860013 GripStrip Gemischt, 12 Streifen**  
Enthält jeweils 3 Streifen der Körnungsgrößen Fein, Medium Mini, Medium und Grob.

Bestellen ist einfach. Rufen Sie uns unter 0800 2368749 an oder kontaktieren Sie den Händler Ihrer Wahl.

Für weitere Informationen besuchen Sie [www.centrixdental.de](http://www.centrixdental.de).