

CENTRIX LubeCube®

Reinigt und schmiert Komposit-Instrumente

Reinigt, konditioniert und schmiert Instrumente.




Vorstellung des LubeCube®. Reinigen und schmieren Sie Ihr Modellierinstrument, in dem Sie es einfach durch den Schlitz oben ziehen.


Bereiten Sie der Klebrigkeit und dem Zurückziehen von Komposit sowie unnötigen Hohlräumen ein Ende. Bei LubeCube ziehen Sie einfach die Schutzfolie von der Rückseite ab, kleben ihn auf eine Oberfläche und ziehen Ihre Instrumentenspitze durch den Schlitz. Durch die Reinigungs- und Schmierwirkung können Sie nun problemlos modellieren. Wir bei Centrix machen Zahnheilkunde einfacher.

- Reinigt, konditioniert und schmiert Instrumente mit einem ungefüllten, lichtaktivierten Bis-GMA/UDMA-Kunstharz Monomer.
- Das Schmiermittel ist kompatibel mit allen licht- und dualhärtenden Kompositen. Kein Alkohol, keine Lösungsmittel.
- Die selbstklebende Rückseite erlaubt die Anbringung an jedem gewünschten Ort.
- Die tropffreie Abgabe von Schmiermittel ergibt die Mikrobeschichtung des Instruments.
- Modellieren Sie Komposite schneller und einfacher, mit weniger „Zurückziehen“.
- Macht jedes Kompositinstrument „nicht klebend“.
- Der opake Schaumstoffwürfel schützt das Kunstharz-Schmiermittel vor Polymerisation.
- Preiswerter Einwegartikel.
- Glattere, weniger poröse Kompositoberflächen (siehe Abbildung auf der Rückseite).


LubeCube Bedienungsanleitung

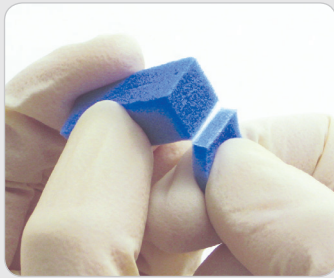

SCHRITT 1 Schutzfolie von der Unterseite des LubeCube abziehen.

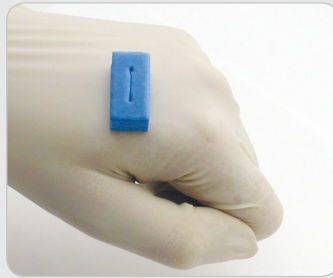

SCHRITT 2 LubeCube an der gewünschten Stelle platzieren und/oder befestigen (Handrücken, Patientenumhang, Tray usw.).

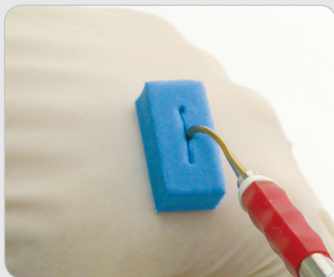

SCHRITT 3 Die Spitze des Kompositinstruments in den Schlitz des LubeCube stecken. Spitze des Kompositinstruments im Schlitz hin und her schieben, um sie zu reinigen und zu schmieren.




SCHRITT 4 Das Kompositinstrument herausnehmen und mit dem Modellieren der Restauration beginnen. Die Schritte 1 bis 4 nach Bedarf wiederholen, bis die Restauration fertig ist. Gebrauchten LubeCube entsorgen.

Glattere, weniger poröse Kompositoberflächen!


Mit LubeCube



Ohne LubeCube

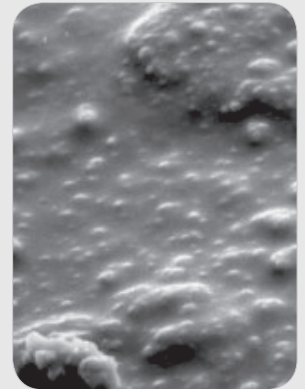

Lichtaktiviert, 750-fache Vergrößerung

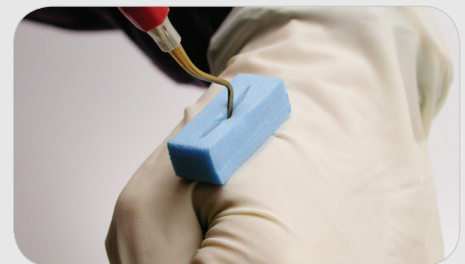

Der LubeCube reinigt und schmiert Ihre Modellierinstrumente und macht so das Konturieren von Kompositen noch schneller und einfacher.



Bestellinformationen

LUBECUBE

Reinigt und schmiert Komposit-Instrumente

Art. Nr. 310108 72 LubeCubes

Das Bestellen ist einfach. Rufen Sie kostenfrei unter **0800 2368749** an oder wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Händler.
Weitere Informationen unter www.centrixdental.de.

