

NoMIX[®]

Provisorischer Zement für Kronen und Brücken


DIE PRAKTISCHE PATIENTENTUBE!



*Eine professionelle
Lösung!*

NOMIX[®] PROVISORISCHER ZEMENT MACHT ES IHNEN UND IHREN PATIENTEN LEICHTER.

NoMIX ist der einzige vorgemischte, provisorische Ein-Komponenten-Zement. Im Gegensatz zu herkömmlichen provisorischen Zementen ist bei NoMIX kein Anmischen, Aufspachteln oder Reinigen von Verschmutzungen erforderlich. Nichtsdestotrotz bietet NoMIX einen überzeugenden Halt. Mit den neuen NoMIX Tuben zur häuslichen Anwendung haben Patienten – zu Hause oder unterwegs – eine praktische Lösung zur Hand, die Notdienstbesuche seltener macht. Die vorgefüllten Spritzen ermöglichen eine schnelle und präzise Platzierung des Zements auf Restaurationen.

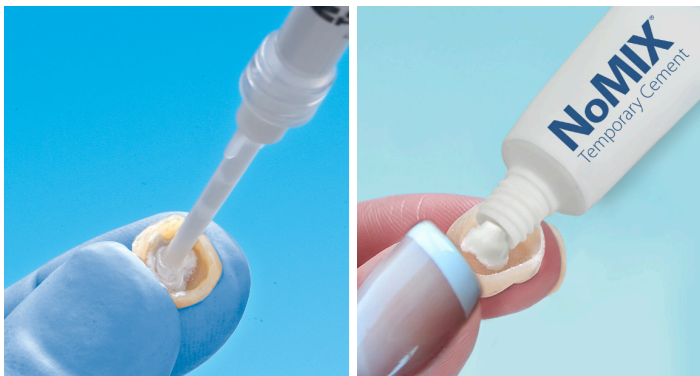

EIGENSCHAFTEN:

- Kein Anmischen, keine Verschmutzungen.
- Einfache Anwendung, in der Praxis oder zu Hause.
- Eugenol-frei und dadurch mit allen Kunstharzmaterialien oder Bondingmitteln verträglich.

centrix[®]
MAKING DENTISTRY EASIER

VORTEILE:

- Patiententube für Zuhause** — sichere Anwendung zu Hause, macht nächtliche Notdienstbesuche seltener.
- Feuchtigkeitsaktiviert** — eliminiert trockenes Zementieren und vermeidet eine postoperative Überempfindlichkeit.
- Vorgefüllte 1-ml-Spritze** — perfekt für ein einfaches und direktes Auftragen auf Restaurationen.
- Kein Eugenol** — hindert Kunstharzmaterialien nicht am Abbinden.

AKTIVE INHALTSSTOFFE:

- Kaliumsulfat** — desensibilisierende Wirkung auf den Zahn.
- Zinkoxid** — antibakteriell, schützt vor dem „schwarzen Pilz“ und dem dazugehörigen Mundgeruch.
- Calciumsulfat** — dehnt sich wenig aus, bessere Randedichte.

Arbeitszeit 5 Minuten. Abschließende Abbindezeit 15 Minuten!



1
Alten Zement von der Zahnpräparation entfernen.



2
Alten Zement von der Krone entfernen.




3
Tube öffnen und Folienversiegelung entfernen.
Drücken Sie eine kleine Menge in die Krone.



4
Präparierten Zahnstumpf befeuchten.



5
Setzen Sie die Krone zurück in den Mund und schließen Sie den Mund normal.

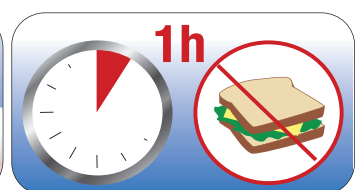

1h
1 Stunde lang nichts essen.

NOMIX-SPRITZENTECHNIK:

- Präparierte Zähne feucht lassen. Nicht trocknen.
- Innenflächen der trockenen Krone leicht mit NoMIX Provisorischem Zement bedecken.
- Restaurationen einsetzen, Sitz überprüfen und den Patienten zubeißen lassen
- 5 Minuten warten. Der Zement ist nun ausreichend abgebunden, sodass überschüssiger Zement vorsichtig entfernt werden kann. Die interproximalen Bereiche durch Hindurchziehen (nicht Aufwärtsziehen) verknoteter Zahnseide reinigen
- Der Zement ist nach ungefähr 15 Minuten vollständig abgebunden. Der Patient sollte mindestens 1 Stunde nichts essen.

BESTELLINFORMATIONEN:

REF 310157 NoMIX Take-home-Box
50 x 0,5 g Patiententuben

REF 310520 NoMIX Starter Kit
6 x 1 ml vorgefüllte Spritzen
30 Spritzenaufsätze
24 x 0,5 g Patiententuben

REF 290040 NoMIX-Nachfüllkit
12 x 1 ml vorgefüllte Spritzen
60 Spritzenaufsätze

REF 640002 NoMIX-Spritzenaufsätze
30 Spritzenaufsätze

Bestellen ist einfach. Rufen Sie kostenfrei unter 0800 2368749 an oder wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Händler. Weitere Informationen unter www.centrixdental.de