



PROXIDISCS®

Diamantbeschichtete Scheiben zur leichten und sicheren Bearbeitung von Kontakten

Mit den proximalen Trennscheiben aus Edelstahl können enge Kontakte geöffnet und Materialüberschüsse und Zementreste leicht entfernt werden. Platzieren Sie die ProxiDisc Trennscheiben einfach an der Kontaktstelle um Dentalmaterialien zu entfernen oder die Zähne auszurichten. Hierbei kommen Sie ohne „Sägen“ aus, welches zu einem Schaden am Zahnschmelz beider Zähne durch Abschleifen führen würde.

Diamant-ProxiDiscs sind auf einer Seite mit feinen Diamanten beschichtet, wobei die andere Seite glatt ist. Nach dem Durchbrechen des Zements, kann die Scheibe schnell Materialüberschüsse entfernen, während der Zahnschmelz am benachbarten Zahn geschützt wird. Diamant-ProxiDiscs ermöglichen auch die einfachere Platzierung von Matrizenbändern.

Glatte ProxiDiscs werden zudem verwendet, um Kontakte zu lösen oder Zähne auszurichten, wenn keine Entfernung von Zement oder Zahnschmelz gewünscht wird. Die dünne, glatte Scheibe gleitet leicht zwischen die Zähne.

ProxiDiscs weisen ein gebogenes ‚Kipphobel‘-Design auf, mit Hilfe dessen die Scheibe leicht durch den Kontaktbereich gerollt werden kann, bis der Zement bricht oder die Zähne ausgerichtet sind. Dieses Design schützt den Zahn vor einem unerwünschten Abriebschaden, wo sich Bakterien und Plaque anheften und ansammeln können. Gezahnte Kanten können einen Schaden am Zahnschmelz beider Zähne verursachen, ebenso wie Sägeblätter die Oberflächen an beiden Seiten eines Schnitts abschleifen können.

ProxiDiscs sind sehr leicht anzuwenden. Durch eine kräftige Kippbewegung ist die ProxiDisc einfach mit Druck durch den Kontaktbereich abzurollen, um sanft Materialüberschüsse, die zwischen den Zähnen eingeklemmt sind, zu entfernen, ohne die Restauration oder den Zahnschmelz an beiden Zähnen zu beschädigen.

Nach dem Gebrauch lassen sich die hochwertigen ProxiDiscs aus Edelstahl für eine erneute und hygienische Verwendung leicht reinigen und sterilisieren.



APPLIED DIAMOND TECHNOLOGY (ADT)

Die Veredelungs- und Polierprodukte von Couture zeichnen sich durch die Centrix Applied Diamond Technology (ADT) aus: einzigartige und präzise Formulierungen ultrafeiner Diamantpartikel, die für ausgezeichnete ‚Hochglanz‘-Oberflächen mit natürlichem Weißgehalt und Schimmer sorgen.

Durch ADT ist eine schnellere Formung, eine einfachere Veredelung und ein glatteres Polieren möglich, dies resultiert in einer ästhetischen und vital anmutenden Restauration.



www.centrixdental.de | 0800 2368749



1. Verwendung einer einseitigen diamantbeschichteten ProxiDisc, um den Kontaktbereich zu öffnen, bevor eine alte Kompositrestauration entfernt wird.



2. Einführen der ProxiDisc über den Kontaktbereich. Zurück- und Vorrollen, um den Kontakt zu lösen.



3. Die feine Diamantbeschichtung entfernt leicht den Zement, während die glatte Oberfläche auf der anderen Seite den benachbarten Zahn nicht beschädigt.



4. Die durch die Verwendung der ProxiDisc herbeigeführte Trennung ist deutlich sichtbar.

Produktbeschreibung:

Proximale Trennscheiben aus Edelstahl, die in engen Bereichen zwischen den Zähnen Platz schaffen. **Diamant-ProxiDiscs** entfernen leicht überschüssigen Zement. **Glatte ProxiDiscs** sind ideal zur Ausrichtung der Zähne. Beide verfügen über glatte Rückseiten, um den Zahnschmelz der benachbarten Zähne zu schützen.

Angaben für den Gebrauch:

Um Platz in engen Kontaktbereichen zwischen den Zähnen zu schaffen, Kontaktbereiche anzupassen, zu lösen oder zu glätten sowie Bindemittel-, Granulat- oder Zementüberschüsse zwischen den Zähnen zu entfernen. Um Zähne bei engen Zahnreihen oder während Zahnbehandlungen auszurichten.

Praktische Hinweise:

- ◆ Führen Sie eine kräftige Kippbewegung durch, um die ProxiDisc einfach durch den Kontaktbereich abzurollen
- ◆ Ist eine weitere Reduzierung erforderlich, bewegen Sie die ProxiDisc in bukkolingualer Richtung.

BESTELLINFORMATIONEN



BESTELL-NR. 390010
Diamant 1-seitig (4 St.)



BESTELL-NR. 390011
Glatt, 2-seitig (8 St.)

Bestellen ist einfach. Rufen Sie uns unter 0800 2368749 an oder kontaktieren Sie den Händler Ihrer Wahl.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.centrixdental.de.